

POGLED NA VAŠ BREEZE® 2 INSTRUMENT:



Podignuti poklopac odjeljka s tipkama



Stražnja strana instrumenta



1. Otvorite instrument

Okrenite instrument (zaslon okrenut prema dolje), a zatim ga otvorite pritiskom na stražnji rub **kvačice za otvaranje** i povucite prema gore.



2. Umetnite disk

Umetnite novi disk za 10 mjerenja – s neravnom stranom prema gore.




Zatvorite instrument i pritisnite da klikne.

VAŽNO
Neka instrument ostane polegnut.



3. Pripremite lancetar


Uklonite kapicu s lancetara Ascensia® MICROLET®.

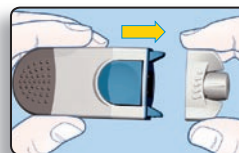


Zakrenite za četvrtinu kruga (ali nemojte ukloniti) zaštitnu kapicu lancete.



Učvrstite lancetu da biste “napeli” uređaj.

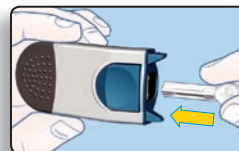


Odvrnite do kraja kapicu lancete i uklonite je, a zatim vratite kapicu lancetara.

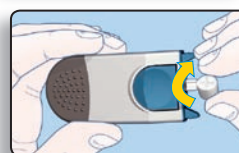


4. Izvucite test-senzor

Povucite i gurnite natrag ručicu instrumenta da bi se pokazao test-senzor i automatski *uključio* instrument.

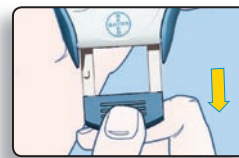


Napomena: tipka za **otpuštanje** je GORE, test-senzor je izvučen van i na zaslonu se pojavljuje niz treptućih poruka za umetanje krvi. Instrument je spreman za mjerenje glukoze u krvi.

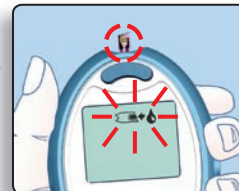

5. Mjerenje

Ubodite jagodnicu prsta i napravite malu, **okruglu** kapljicu krvi.

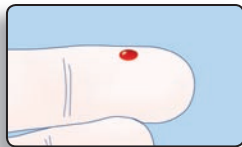


Pomaknite čitav prednji rub test-senzora dok ne dodirne kapljicu krvi. Krv se automatski uvlači u test-senzor i u potpunosti ga ispunjava.




Držite test-senzor u istom položaju dok se instrument ne oglasi zvučnim signalom i ne započne odbrojavati, a zatim ga odmaknite.




Rezultat mjerenja prikazuje se na zaslonu nakon odbrojanih 5 sekundi i automatski će biti pohranjen u instrument za buduću uporabu.

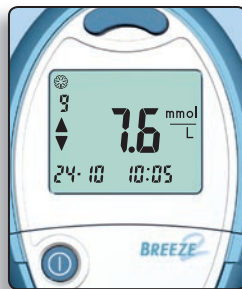

Držite instrument okrenut prema dolje iznad kante za smeće i pritisnite **tipku za otpuštanje**.

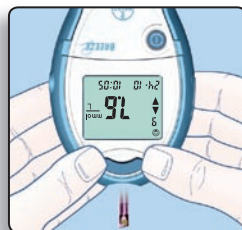


Iskorišteni test-senzor past će ravno u kantu za smeće.

Pritisnite tipku  da biste isključili instrument i produljili vijek trajanja baterije. (Na *poledini naslovne stranice pogledajte gdje se tipka nalazi.*)


RJEŠAVANJE PROBLEMA I POGREŠKE:



Bilo je problema s punjenjem test-senzora krvlju. Ponovite mjerenje s novim senzorom.

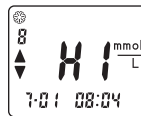

Rezultat mjerenja je iznad 33,3 mmol/L. Pomno operite i osušite ruke i mjesto uzimanja uzorka, a zatim ponovite mjerenje. Ako se ponovno pojavi oznaka **HI**, obratite se vašem liječniku ili stručnom medicinskom djelatniku.

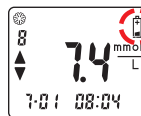

Baterija je slaba. Zamijenite bateriju (CR2032) nakon 20 očitavanja ili jednog tjedna.

Za više informacija o rješavanju problema i pogreškama pogledajte Upute za uporabu.



Bayer HealthCare

MediLab d. o. o.
Hondlova 2/9
10000 Zagreb
Hrvatska
Tel : 01 2356 720

©2006 Bayer
50184355 Rev. 12/06

ASCENSIA®
BREEZE™
Sustav za mjerenje glukoze u krvi

Kratke upute za uporabu



Za uporabu s
Ascensia® **BREEZE™**
instrumentom za
samokontrolu i
Ascensia® **BREEZE™**
test-diskom za
10 mjerenja

