

Ihr CONTOUR TS Messgerät:



Display

Taste (Blättern)

Taste M (Ein/Aus, Speicherabruf, Eingabe)

Orangefarbene Testsensorenschlitz

Ihr CONTOUR TS Testsensor:

Probenspitze: Das Ende des Testensors, wo das Blut eingesogen wird.

Ende mit grauer Elektrode: Dieses Ende wird (mit dem grauen Ende nach oben) in den orangefarbenen Testsensorenschlitz des Messgeräts eingeführt.


Benötigen Sie Hilfe?
0810/00 82 93
www.bayer.at / www.ascensia.at

Einsetzen des Testensors:

Nach der Entnahme eines Testensors aus der Flasche sollten Sie **den Deckel sofort wieder fest verschließen**.

Halten Sie den Testsensor mit dem grauen Ende nach oben und führen Sie ihn in den orangefarbenen Testsensorenschlitz ein. *Eine Kodierung ist nicht erforderlich!*

Wenn ein Testsensor mit einem blinkenden Blutropfen angezeigt wird, ist das Messgerät bereit für den Test.

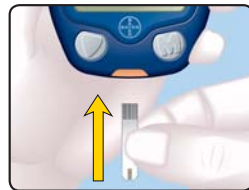


Entnehmen des Blutstropfens:

Drücken Sie die Stechhilfe mit Nachdruck auf die Einstichstelle und drücken Sie die blaue Auslösetaste.




Führen Sie den Test sofort nach Austreten des Blutstropfens durch.

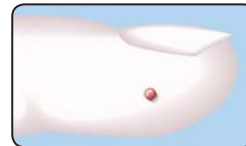

Empfohlene tatsächliche Tropfengröße

Durchführen des Blutzuckertests:


Halten Sie die **Spitze** des Testensors sofort in den Blutstropfen. Das Blut wird durch die Spitze in den Testsensor gesogen.

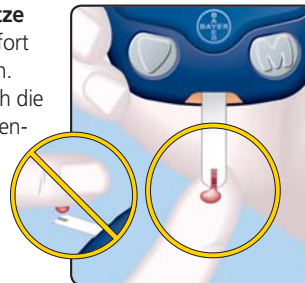


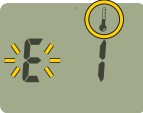

Halten Sie die Spitze des Testensors in den Blutstropfen, bis das Messgerät einen Signalton abgibt und der 8 Sekunden dauernde Countdown beginnt.

Das Testergebnis wird angezeigt und automatisch im Speicher des Messgeräts abgelegt.

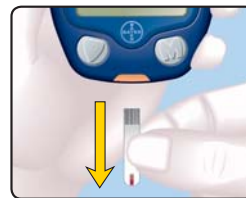

Um das Messgerät abzuschalten, ziehen Sie einfach den Testsensor heraus. Entsorgen Sie den gebrauchten Testsensor vorsichtig.






Fehlermeldungen und -symbole:

ANZEIGE	ERKLÄRUNG	ZU ERGREIFENDE MASSNAHME
	Batterie ist fast leer.	Wechseln Sie die Batterie so bald wie möglich.
	Temperatur liegt außerhalb des vorgegebenen Bereichs.	Begeben Sie sich an einen Ort, an dem die für das Gerät zulässige Betriebstemperatur herrscht: 5–45 °C. Warten Sie vor dem Test zwanzig Minuten ab, damit Messgerät und Testsensoren sich der Temperatur anpassen können.
	Der Testsensor hat sich nicht ausreichend voll gesogen, um einen genauen Test zu ermöglichen.	Nehmen Sie den Testsensor heraus und wiederholen Sie den Test mit einem neuen Testsensor.

Umfangreiche Informationen zu Problembeseitigung und Fehlern finden Sie in Ihrer Bedienungsanleitung. Oder wenden Sie sich an den Bayer Diabetes Care Kundendienst: **0810/00 82 93**

ANZEIGE	ERKLÄRUNG	ZU ERGREIFENDE MASSNAHME
	Das Messgerät meldet einen gebrauchten Testsensor.	Nehmen Sie den Testsensor heraus und wiederholen Sie den Test mit einem neuen Testsensor. Warten Sie mit dem Ansaugen der Blutprobe, bis Sie im Display den blinkenden Blutropfen sehen.
	Testsensor nicht richtig eingesetzt.	Nehmen Sie den Testsensor heraus und setzen Sie ihn richtig ein.
E5 E6 E8 E9	E10 E11 E12 E13	Mögliches Software- oder Hardwareproblem. Nehmen Sie den Testsensor heraus und wiederholen Sie den Test mit einem neuen Testsensor. Wenn das Problem weiter besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

ANZEIGE	ERKLÄRUNG	ZU ERGREIFENDE MASSNAHME
	Falscher Testsensor.	Nehmen Sie den Testsensor heraus und wiederholen Sie den Test mit einem CONTOUR TS Testsensor.
	Testergebnis liegt über 600 mg/dL.	<ul style="list-style-type: none"> Waschen Sie Hände und getestete Körperstelle. Wiederholen Sie den Test mit einem neuen Testsensor. Wenn das Ergebnis immer noch „HI“ oder „LO“ ist, wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt oder Diabetesberater.
	Testergebnis liegt unter 10 mg/dL.	
<p>ACHTUNG: Ein Blutzuckerspiegel von über 250 mg/dL oder unter 50 mg/dL kann auf einen eventuell gefährlichen medizinischen Zustand hindeuten.</p>		

 **CONTOUR^{TS}**
Blutzuckerkontrollsystem

Kurzanleitung

 **NO CODINGTM**



Zur Verwendung mit dem CONTOURTM TS Blutzuckerkontrollsystem und CONTOURTM TS Testsensoren (Lesen Sie sich die ausführlichen Anweisungen in der Bedienungsanleitung sowie Packungsbeilage zur Stechhilfe durch, bevor Sie eine Blutzuckermessung durchführen.)

www.bayer.at
www.ascensia.at

 Bayer HealthCare

Bayer Austria Ges. m.b.H.
Herbststrasse 6-10
1160 Wien
Hotline: 0810/00 82 93

Bayer
©2007 Bayer
50184364 Rev. 3/07