



# Contour<sup>®</sup> TS Контур TC

Система контроля уровня глюкозы в крови



Без кодирования™

## Краткое руководство

Прежде чем начать измерение уровня глюкозы в крови, ознакомьтесь с Руководством пользователя и инструкцией, которая прилагается к скарификатору.

## 1. Измерительный прибор и тест-полоски CONTOUR TS [Контур TC]



**Серый край с электродом:**  
Этот край (серой частью вверх) вставляется в оранжевый порт для тест-полосок на измерительном приборе.




**Заборный кончик:**  
Кончик тест-полоски, через который втягивается крови.

Для проведения тестирования с помощью измерительного прибора CONTOUR TS выполните следующие простые действия.




## 2. Использование скарификатора MICROLET<sup>®</sup> 2 [МИКРОЛЕТ2]

**Внимание:** Ланцеты для прокалывания предназначены для индивидуального тестирования только одного человека.

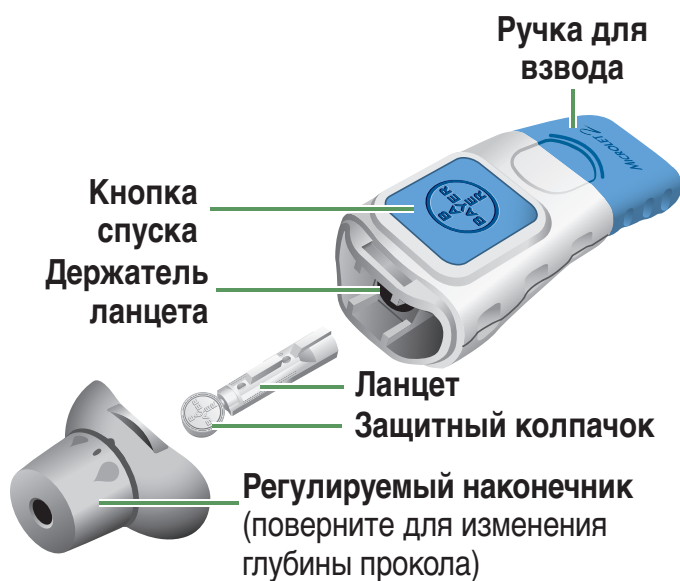

### Подготовка скарификатора:

1. Снимите наконечник скарификатора MICROLET2 [МИКРОЛЕТ2].
2. Поверните (не снимая) защитный колпачок ланцета на 1/4 оборота.
3. Вставьте ланцет в скарификатор до упора. Устройство будет поставлено на взвод.

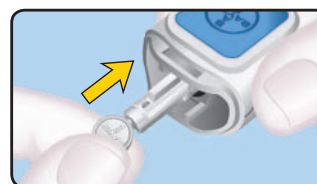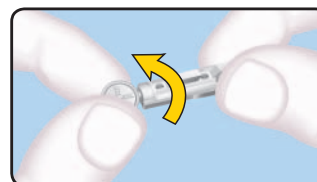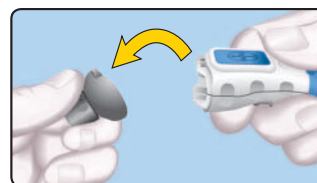

4. Откройте защитный колпачок ланцета.



5. Установите наконечник устройства на место.



6. Выберите глубину прокола с помощью регулятора.



Неглубокий прокол      Глубокий прокол

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если Ваш скарификатор не соответствует изображенному на рисунке, следуйте руководству, поставляемому с Вашим устройством.


bayerhealthcare.ru

<b>SCHAWK!</b>	1600 Sherwin Ave. Des Plaines, IL 60018 T 847.296.6000	<b>Art Production</b> All Images/Codes are FPO	<b>FONTS</b>	<b>COLORS</b>
	DATE: June 5, 2009 CLIENT: Bayer Health Care DESCRIPTION: Contour TS QSG - Rus  SCHAWK JOB#: 475110G02 BAN#: 81793426 Rev. 03/09 SKU#: N/A BAYER SPEC: 9.5" (H) x 11.25" (W) UPC CODE: N/A		Helvetica, Times, Arial	PROCESS CYAN PROCESS MAGENTA PROCESS YELLOW PROCESS BLACK PMS 072 PMS 1665
<b>V-1</b>	<b>LANGUAGE(S): RUSSIAN (RU)</b>		NOTE: THIS COLOR PROOF INDICATES COLOR BREAK ONLY AND MAY NOT ACCURATELY REFLECT ACTUAL PRODUCTION COLOR	


### 3. Подготовка измерительного прибора

1. Вымойте и высушите руки.
2. Извлеките тест-полоску из флакона и **плотно закройте крышку. Не храните тест-полоски вне флакона.**

3. Удерживая тест-полоску серым краем вверх, вставьте ее в оранжевый порт для тест-полосок.

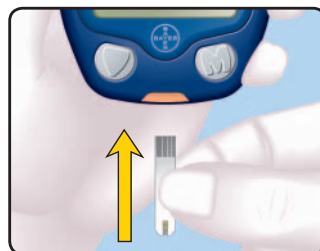

4. Измерительный прибор включится. На дисплее появляется тест-полоска с мигающей каплей крови, указывающая на то, что измерительный прибор готов к тестированию.

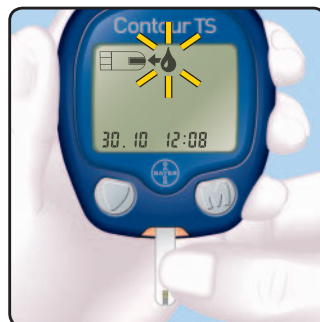


### 4. Измерение уровня глюкозы в крови


1. Плотно прижмите скарификатор к месту прокола и нажмите синюю кнопку спуска.



2. Подождите несколько секунд. С небольшим нажимом проведите рукой по пальцу в направлении места прокола для формирования капли крови.

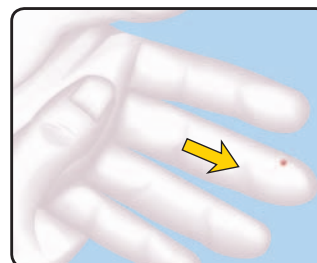


Тест необходимо провести сразу же после формирования капли крови. Для теста достаточно всего 0,6 мкл.

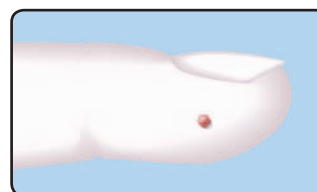

Рекомендуемый размер капли крови

3. Держите Ваш измерительный прибор оранжевым портом для тест-полосок вниз либо по направлению к себе. Это позволит Вам быть уверенным, что Ваш прибор расположен правильно, когда Вы будете читать результаты теста.

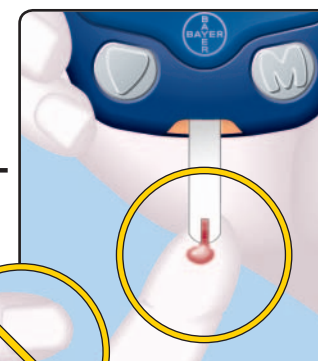

Сразу после формирования капли крови прикоснитесь к ней **заборным кончиком** тест-полоски. Через него кровь втягивается в тест-полоску. **Не прижимайте заборный кончик к коже и не капайте кровью на поверхность тест-полоски.**

Удерживайте заборный кончик тест-полоски в капле крови до тех пор, пока не прозвучит сигнал.

### Измерение уровня глюкозы в крови

### 5. После тестирования

4. После сигнала прибор начинает 8-секундный отсчет, а затем на экране отображается результат тестирования. Удостоверьтесь, что оранжевый порт для тест-полосок расположен вниз, когда Вы будете читать результаты теста.



Результат автоматически сохраняется в памяти прибора.

Дополнительную информацию по результатам тестирования см. в руководстве пользователя.


**Тест-полоски предназначены только для одноразового использования. Не используйте их повторно.**

1. Для выключения прибора извлеките тест-полоску.


**Чтобы предотвратить нанесение травмы или заражение других людей, всегда утилизируйте использованные ланцеты и полоски надлежащим образом. Для каждого тестирования используйте новые ланцет MICROLET® [Микролет] и тест-полоску CONTOUR™ TS [Контур ТС].**

2. Чтобы удалить использованный ланцет: аккуратно поверните крышку на 1/4 – надавите на ланцет, раздастся щелчок, можно удалить защитную крышку.
3. Положите защитный колпачок на ровную поверхность логотипом Bayer вниз.

4. Надавите использованным ланцетом MICROLET2, все еще находящимся в устройстве для прокалывания, на центр колпачка.

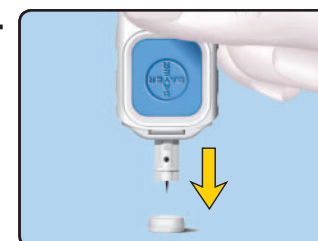

5. Поместите ланцет в мусорный контейнер для острых предметов. Держите вне досягаемости детей. Удерживая нажатой голубую кнопку (a), с небольшим усилием потяните за голубую регулируемую ручку (b), ланцет выпадет. Замените крышку.

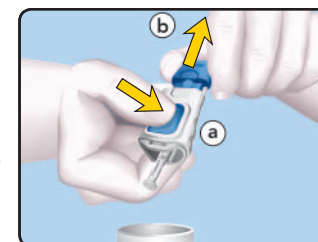

Чтобы использовать все преимущества измерительного прибора компании Bayer Diabetes Care, **заполните и отправьте по почте гарантийный талон.** Для получения помощи воспользуйтесь бесплатным номером 8 800 200 44 43; +7 495 775 16 50 или посетите веб-сайт [www.bayerhealthcare.ru](http://www.bayerhealthcare.ru)

А/О Байер  
Отдел Диабетической продукции  
3-я Рыбинская ул., д. 18, стр. 2  
107113 Москва, Россия  
Тел. 8 800 200 44 43  
+7 495 775 16 50

Bayer

©2007 Bayer  
81793426 Rev. 3/09