

ELITE®



Kurzbedienungsanleitung

Einsetzen des Testsensors



- Nehmen Sie den Teststreifen aus der luftdichten Verpackung
- Führen Sie den **Ascensia Elite Testsensor** wie oben, mittig auf dem Gerät abgebildet bis zum Anschlag in den Sensorschlitz ein.
- Das Gerät schaltet sich automatisch ein

Entnehmen des Blutstropfens



- Drücken Sie die Stechhilfe mit Nachdruck auf die Einstichstelle und drücken sie die blaue Auslöstaste
- Führen Sie den Test sofort nach Austreten des Blutstropfens durch.

Durchführen des Blutzuckertests



- Halten sie die **Spitze** des Testsensors sofort in den Blutstropfen. Das Blut wird durch die Spitze in den Testsensor gesogen.
- Halten Sie die Spitze solange in den Blutstropfen, bis das Messgerät einen Signalton abgibt und der 8 Sek. Countdown beginnt.



- Das Testergebnis wird angezeigt und automatisch im Speicher des Messgeräts abgelegt
- Um das Messgerät abzuschalten, ziehen Sie einfach den Testsensor heraus. Entsorgen Sie den gebrauchten Testsensor vorsichtig.