



Kendini ispatlamış bir klasik.

Kolay ölçüm.



Ascensia
ELITE

 Bayer HealthCare

- Benzersiz, düğmesiz kullanım
- Kodlama gerekmez*: Hata kaynakları ortadan kaldırılmıştır
- Otomatik açma ve kapama
- Küçük, düz ve rahat

*Mays 1998'den beri üretilen Ascensia ELITE® Bayer'in glikoz ölçüm cihazları sadece Ascensia ELITE® sensörlerinin kullanılması halinde kodlamaya ihtiyaç duymaz.



Ascensia ELITE®
Sensörleri



Ascensia ELITE® – güvenilir ölçüm sonuçları için.



Ascensia ELITE® sensörü glikoz ölçüm cihazına takılır. Sensörün ölçüm ucunu kan damlası içine batırınız.



Patentli Bayer Sip-In® teknolojisi sayesinde belirli bir miktarda kan hızlı bir şekilde ve otomatik olarak emilir.

Ascensia ELITE® Sensörün yerleştirilmesi.

Yeni bir sensör paketi açarken Ascensia ELITE® cihazını kod sensörünü yerleştirerek kodlayınız. Kod (F-5) ekranda gösterilir.



Sensörler ellenebilir!

Folyoyu açmak için folyo uçlarını birbirinden ayırınız.



Ascensia ELITE® sensörünü sensör yuvası sonuna kadar iterek takınız. Cihaz otomatik olarak açılır.



Kan damlasının çıkartılması.

Ascensia MICROLET® batırma derinliği ayarlanabilir iğne kılavuzu ile küçük bir kan damlası çıkartınız. Vücudunuzun farklı yerlerindeki (Önkol, uyluk veya karın) glikoz ölçümünde kan çıkartmak için Ascensia MICROLET VACULANCE®'ı kullanınız.

Ascensia MICROLET® batırma derinliği ayarlanabilir iğne kılavuzu ile.

- Parmak ucundan kan alımı
- 5 farklı ve kolay ayarlanabilen dalma derinliği
- Kolay kullanım, neredeyse acısız uygulama
- Ascensia MICROLET® Neşter ile kullanılır (1x 100, 1x 200, 1x 200 renkli)

Ascensia MICROLET VACULANCE® Vücudunuzun farklı yerlerinden kan numunesi almak için iğne kılavuzu (AST).

- Önkol, uyluk veya karından kan numunesi alımı
- Vücudun farklı yerlerinden glikoz ölçümleri yapıldığında parmak ucundan alınan kan örneklerine göre farklı glikoz değerleri verebilir, bu nedenle ölçümlerin yalnızca şu zamanlarda yapılması gerekir:
 - öğün öncesinde
 - bedensel çalışmadan 2 – 3 saat sonra
 - ensülin alındıktan 2 – 3 saat sonra

Bilgi: Glikozun düşmesi (Hipoglisemi) tehlikesi halinde glikoz ölçümü parmak ucundan yapılmalıdır.

Ascensia
ELITE

 Bayer HealthCare

Glikoz ölçümünün uygulanması.



Ascensia ELITE® sensörünün ölçüm ucunu kan damlası içine batırınız. Patentli Bayer Sip-In® teknolojisi sayesinde kan miktarı (sadece 2µl) otomatik olarak emilir.



Sensör ucunu kan damlası içinde sinyal sesi duyulana kadar bekletiniz. Ekranda "29" rakamı gösterilir.

Cihaz saniyeler halinde "1" rakamına kadar geri sayar, ardından ölçüm sonucunu ekranda gösterir.



Ölçülen değer 3 dakika boyunca gösterilir. Bu değeri rahatça glikoz günlüğüne yazabilirsiniz. Sonra sensörü çıkartınız. Cihaz otomatik olarak kapanır. Sensör çıkartıldığında ölçülen değer otomatik olarak hafızaya alınır.

Ölçümün sonlandırılması.



Sonucun hafızaya alınmasını istemiyorsanız, sensörü çıkartmanız ve 2 saniye içinde yeniden cihaza takmanız yeterlidir. Ekranda "dEL" gösterilir ve ölçüm sonucu kaydedilmez.

Hafızadaki ölçüm sonuçlarının gösterilmesi.



Ascensia ELITE® kontrol sensörünü sensör yuvası sonuna kadar iterek takınız.



Sinyal sesinden sonra kısa bir süre fonksiyon kontrolü göstergesi, başka bir sinyal sesinden sonra ise ekranda kontrol sensörünün ölçüm sonucu görünür.



10 saniye sonra ise hafızada bulunan değerler otomatik olarak gösterilir. Önce 2 saniye süreyle "A" göstergesi gösterilir, ardından 4 saniye süreyle hafızadaki glikoz değerlerinin ortalaması gösterilir.



Sırayla ölçüm değerlerinin tamamı gösterilir.

Ölçülen son sonucun önünde "1" rakamı, ondan bir öncekinin önünde "2" vb. rakamları yazılıdır.

Hafızanın silinmesi.



Hafızanın tamamını silmek için hafızadaki değerler gösterilirken kontrol sensörünü cihazdan çıkartmanız ve 2 saniye içerisinde yeniden cihaza takmanız gerekmektedir.



Ekranda saniye saniye "dEL" ve "ALL" göstergeleri gösterilir. Beş defa gösterildikten sonra bu göstergeler kaybolur.

Hafıza silinmiştir.


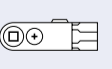





Hata bildirimleri ve çözümleri.

Kullanma Kılavuzunun "Hata bildirimleri ve çözümleri" bölümünde önemli tüm bilgiler mevcuttur.

Veya doğrudan **Ascensia®** Diabetes Service personelimize başvurabilirsiniz:

0800 / 72 61 880 (ücretsiz)

► www.ascensia.de

Ürün	Ürün. No.	PZN
 Ascensia ELITE® Set	03272727	3096934
Ascensia ELITE® Tek cihaz mg	08805855	3096928
Ascensia ELITE® Set mmol	04504613	3096957
Ascensia ELITE® Tek cihaz mmol	01674097	3096940
 Ascensia ELITE® Sensörleri (Ambalajda 50 adet)	04262733	3096905
 Ascensia ELITE® Kontrol sıvısı Normal Yüksek/Düşük	04506632 01520030	3096992 3097000
 Ascensia MICROLET® İğne kılavuzu batırma derinliği ayarlı	08230194	0764186
 Ascensia MICROLET VACULANCE® İğne kılavuzu	06351385	0764157
 Ascensia MICROLET® Neşter 100 adet 200 adet	03044716 03301786	0764192 0764223
 Ascensia MICROLET® Neşter, renkli 200 adet	00822777	0764217